


INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO MAKIJAŻU PERMANENTNEGO GOOCHIE G6



Goochie Polska
www.goochie.pl

- 1 -

II. Budowa urządzenia

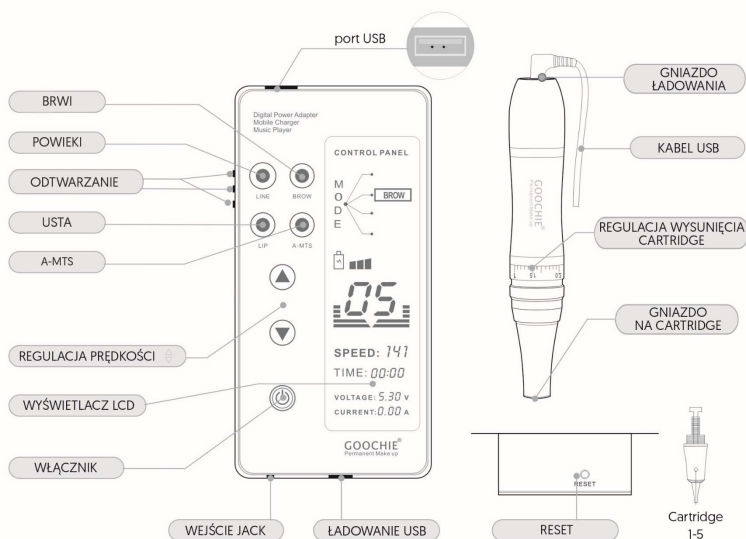

- 3 -

I. Ogólny opis

- Zawartość kompletu
 - rączka,
 - panel sterujący,
 - zasilacz sieciowy,
 - uchwyty, stojak na panel sterujący,
 - kartridge 15 sztuk,
- Zastosowanie urządzenia
Urządzenie jest przeznaczone do wykonywania makijażu permanentnego. Metoda polega na wprowadzeniu pigmentu śród naskórkowo za pomocą jednorazowego kartridża z igłą. Aparat jest przeznaczony do pigmentacji brwi, powiek, ust oraz medycznej. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- Uwagi
 - Urządzenie należy używać w warunkach higienicznych wymaganych przez Państwowy Inspektorat Sanitarny, zgodnie z przepisami BHP.
 - Przed wykonaniem zabiegu należy wykluczyć wszelkie przeciwwskazania u klienta oraz poinformować go o możliwych zagrożeniach i powikłaniach wynikających z wykonanego zabiegu.
 - Bezpieczne użycie nie jest możliwe gdy urządzenie lub akcesoria są uszkodzone i nie działają poprawnie.
- Warunki transportu i przechowywania
 - Urządzenie i jego części powinny być transportowane i przechowywane w odpowiednich warunkach tj. odpowiednia temperatura (+10°C - +35°C) oraz odpowiednia wilgotność [30% - 75%].
- Konserwacja / dezynfekcja urządzenia (po wykonanym zabiegu należy):
 - Upewnić się że urządzenie jest odłączone od prądu elektrycznego.
 - Zużyty kartridż wyrzucić do pojemnika na odpady niebezpieczne.
 - Rączkę dokładnie zdezynfekować poprzez przetarcie całej powierzchni płynem do tego przeznaczonym (płyn do dezynfekcji narzędzi i powierzchni). Do czynności można użyć ręcznika papierowego nasączonego płynem odkażającym. Nie wolno zanurzać rączki, ani spryskiwać jej bezpośrednio. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
 - Okresowo zwrócić uwagę na stan techniczny urządzenia.

- 2 -

III. Instrukcja obsługi

- Montaż kartridża
 - Po nałożeniu rękawiczek jednorazowych przystępujemy do montażu.
 - Wycinamy kartridż z opakowania upewniając się, że nie został on naruszony [np. zerwane opakowanie].
 - W pozycji pionowej dyszą skierowaną do góry wkładamy kartridż i instalujemy go wkręcając go do oporu zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara z kalibracją ustawioną na zero.
- Uruchamianie urządzenia – WARIANT I (zasilacz sieciowy)
 - Podłączamy panel urządzenia do sieci (prądu elektrycznego) za pomocą zasilacza sieciowego. Wkładając zasilacz sieciowy do gniazda elektrycznego. Kabel z końcówką USB wkładamy do odpowiedniego wejścia w panelu, a jego drugi koniec wkładamy do wejścia na rączce.
 - Naciskamy przycisk ON/OFF aby włączyć panel sterujący.
 - Wybieramy przycisk interesującego nas programu:
 - LINE – program do pigmentacji powiek
 - BROW- program do pigmentacji brwi
 - LIP – program do pigmentacji ust
 - A-MTS- program do pigmentacji medycznej

Dodatkowo za pomocą strzałek ręcznie można zmieniać ilość uderzeń igły w kartridżu.

 - Ustawiamy długość wysunięcia igły poprzez przekręcanie regulatora na wybraną długość w prawo lub lewo. Ustawioną długość wskazuje strzałka na rączce.
Sugerowane wysunięcie igły w kartridżu:
 - Brwi 1 - 1,5 mm
 - Usta 0,8 - 1,2mm
 - Powieki 0,8 - 1mm
- Uruchamianie urządzenia – WARIANT II (akumulator)
 - Upewnij się, że zewnętrzny panel sterujący jest naładowany.
 - Zainstaluj kartridż w rączce.
 - Podłącz rączkę do panelu sterującego LCD.
 - Naciśnij przycisk ON/OFF w celu włączenia panelu.
 - Wybieramy przycisk interesującego nas programu.
- Ładowanie akumulatora
 - Ładowanie odbywa się poprzez podłączenie kabla zasilającego do panelu sterującego i do sieci. Jeżeli wyświetlacz pokazuje zaciemnione wszystkie kreski z poziomu naładowania baterii oznacza to pełną baterię. Jeśli wyświetlacz pokazywał będzie poniżej trzech zaciemnionych kresek należy podłączyć panel do pełnego naładowania.
- Demontaż kartridża
 - Urządzenie wyłączyć i odłączyć od zasilania prądu elektrycznego.
 - Zdemontować kartridż poprzez odkręcenie w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
 - Dalsze instrukcje w punkcie Konserwacja / Dezynfekcja.

- 4 -

IV. Parametry techniczne

- Napięcie wejściowe: 100-240V 50/60Hz
- Napięcie wyjściowe 4,5-6V
- Szybkość pracy: 110-180 bps
- Kompatybilne kartridże: R1,R3,R5,F5
- Wymiary panelu: 220x120x23mm
- Waga rączki: 80g
- Urządzenie posiada certyfikat CE

V. Zasady bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia uszkodzeń należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

1. Zasady dotyczące zasilania

UWAGA

- Produktu nie należy instalować w miejscach narażonych na działanie wilgoci. Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Produkt powinien być używany w suchym miejscu.
 - Urządzenie i jego części należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci
 - Nie należy instalować urządzenia na pochylonym miejscu lub podatnym na drgania, bądź też należy unikać używania sprzętu w takim miejscu przez długi czas. Zwiększa to ryzyko uszkodzenia produktu.
 - Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami. Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
 - Jeżeli od przewodu zasilającego, gniazdka elektrycznego lub urządzenia (i jego części) dobiegają niepokojące odgłosy, należy odłączyć przewód od gniazdka i skontaktować się z serwisem. Nie należy używać gniazdka elektrycznego, który jest uszkodzone lub poluzowane.
 - Nie należy odłączać zasilacza urządzenia pociągając za przewód.
-
- Nie należy zbyt mocno zginać przewodu zasilającego ani umieszczać na nim ciężkim przedmiotów. Szczególnie ważne jest, aby przewód zasilający znajdował się w miejscu niedostępnym dla niemowląt i zwierząt domowych. Uszkodzony przewód stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym lub spowodowania pożaru
 - Jeżeli woda lub inna substancja dostanie się do zasilacza sieciowego, urządzenia, baterii lub innych części urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem.

2. Środki ostrożności podczas użytkowania zasilacza sieciowego

UWAGA

- Należy korzystać wyłącznie z zasilacza sieciowego dostarczanego wraz z produktem.
- Korzystanie z innego zasilacza może spowodować problemy podczas pracy urządzenia.

- 5 -

- Uszkodzone przewód, zasilacz, urządzenie lub inne jego części stwarzają zagrożenie porażenia prądem.
- Solidnie podłącz końcówkę przewodu zasilającego do urządzenia.
- Zbyt luźne podłączenie może spowodować problemy w czasie pracy urządzenia.

3. Zasady dotyczące używania baterii

UWAGA

- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Należy korzystać wyłącznie z autoryzowanych akumulatorów i zasilaczy sieciowych.
- Akumulatory i zasilacze nieautoryzowane mogą nie spełniać odpowiednich wymagań dotyczących bezpieczeństwa, powodować nieprawidłowe działanie lub stwarzać zagrożenie wybuchem lub pożarem.
- Nie należy korzystać z urządzenia (akumulatora) w miejscach wilgotnych.
- Urządzenie powinno być używane w warunkach pokojowych.
- Nie należy podgrzewać akumulatora ani wrzucać go do ognia. Nie należy umieszczać ani używać akumulatora w gorących pomieszczeniach. Istnieje ryzyko pożaru lub eksplozji.
- Jeżeli doszło do wycieku płynu z akumulatora lub akumulator wydziela dziwny zapach, należy wyjąć go z urządzenia i skontaktować z serwisem
- W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia należy wymienić zepsuty akumulator na nowy, autoryzowany.

4. Zasady dotyczące rozbudowy

UWAGA

- Nigdy nie należy rozbierać zasilacza sieciowego ani urządzenia.
- Należy używać wyłącznie autoryzowanych części zamiennych.
- Przed wymianą akumulatora należy wyłączyć urządzenie i odłączyć od prądu elektrycznego.

- 6 -

VI. Importer

Goochie Polska Łukasz Godlewski
ul. Wichrowe Wzgórze 7
Nowy Świat
80-299 Gdańsk
www.goochie.pl
+48 530-622-722

VII. Sposób poprawnego usuwania baterii, w którą wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony jest niniejszy produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystywanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

VIII. Symbol CE i uwagi dotyczące zgodności w Unii Europejskiej

Produkt przeznaczony do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.
Oznaczony zgodnością CE.



GOOCHIE[®]
Permanent Make up
Polska

- 7 -